

Visiera in policarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale del volto.

Il suo utilizzo **impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di bassa intensità / velocità di entrare in contatto con le mucose** di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo **massima protezione del volto** e assicurando un **confortevole livello di aerazione**.

Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche, senza creare disagi o fastidi.



Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione, di lunghezza e tensione variabile mediante due fibbie poste all'estremità della montatura. I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la **regolazione della durezza di orientamento dello schermo** quando ruotato verso l'alto (angolazione massima 180°). Il meccanismo è stato studiato affinché lo schermo sia **resistente a sollevamenti da gesti involontari** e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà qualora lo desideri l'utente. **In caso di movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di scalzarsi**. Il peso ridotto della visiera **consente un uso prolungato senza affaticare l'operatore**.

La visiera è **conforme** ai requisiti delle **Norme EN166:2001 | EN167:2001 | EN168:2001**.

I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.

AVVERTENZE

L'utilizzatore prima di procedere all'impiego della Visiera deve prendere completa lettura delle presenti istruzioni: Se la Visiera viene utilizzata con altri dispositivi di protezione (DPI), l'utilizzatore deve valutare se la combinazione è idonea all'utilizzo. Indossare la Visiera prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali è richiesta la protezione.

La Visiera deve considerarsi solo per la protezione personale e non deve essere scambiata tra più utilizzatori. Nell'eventualità che durante l'uso venga danneggiata deve essere immediatamente sostituita; in caso di contaminazione deve essere immediatamente smaltita e sostituita.

Non esporre la Visiera a fonti di calore o radiazioni UV.

DURATA

In relazione al contesto di impiego, la durata della Visiera è correlata alla valutazione dell'utilizzatore a cui si demanda la responsabilità dell'utilizzo. In condizioni normali, l'articolo può essere utilizzato anche per più di 6 mesi dall'apertura della confezione, a meno di requisiti più stringenti derivanti dal contesto di impiego e se vengono rispettate le indicazioni relative all'impiego, alla manutenzione, pulizia e conservazione. Si consiglia comunque di procedere alla sostituzione della Visiera ogni 2 anni e anticipatamente se si denotano segni di degrado.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Dopo ogni uso, prima di riporla nella confezione, verificare l'integrità di ogni componente e pulire la Visiera con sapone. Igenizzare con una soluzione alcolica per almeno 15 minuti, e lasciare asciugare. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non utilizzare detergenti o disinfettanti abrasivi. Conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati, a temperatura tra i 5°C e 40°C in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive.



A T-TEX SRL
ttex@pec.it

Oggetto: Emergenza COVID – 19
Attuazione art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

IL DIRETTORE CENTRALE

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto l'articolo 15 del suddetto decreto-legge, rubricato “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”, che consente, per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;

visto, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 15 che prevede per i dispositivi di protezione individuale una procedura di validazione effettuata dall'Inail sulla base di una autocertificazione delle aziende produttrici e degli importatori, attestante le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e il rispetto da parte degli stessi di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

vista la circolare del Ministero della salute del 18 marzo 2020, pubblicata sul sito www.salute.gov.it, con la quale sono stati forniti elementi interpretativi riguardo, in particolare, all'applicazione del richiamato articolo 15;

vista la nota di istruzioni operative del 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID – 19 Attuazione art.15 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale” pubblicata sul portale www.inail.it;

rilevato che si tratta di una validazione di carattere straordinario, valida per il tempo strettamente necessario e finché dura lo stato di emergenza COVID-19, nell'impossibilità di effettuare le procedure ordinarie di controllo degli standard di qualità e sicurezza dei dispositivi in oggetto;

vista la pratica **CS0501146** con cui la **T-TEX SRL**, in qualità di **Importatore** del seguente prodotto/dei seguenti prodotti:

- Modello: HT-2020038888 (VISIERA); Fabbricante: Shenzhen Hoteam Art & Crafts Co., Ltd.

ha inviato a questo Istituto l'autocertificazione prevista dalla surrichiamata norma nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha attestato le caratteristiche tecniche del citato prodotto/dei citati

P. GIULIO PASTORE, 6 - 00144 ROMA - TEL 0654874922/2073

dcricerca_ufficio1@inail.it - dcricerca@postacert.inail.it

PART.IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

prodotti e ha dichiarato che lo stesso/gli stessi rispetta/no tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

acquisita in data 09/09/2020 la valutazione tecnica resa dalle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione e della documentazione prodotta dal richiedente;

considerato che la valutazione tecnica ha dato il seguente esito positivo:

esaminata la documentazione inviata all'indirizzo pec della DC Ricerca il 31/08/2020 alle ore 15:30 da ttex@pec.it, che integra la documentazione relativa alla richiesta del 19/05/2020 (CS0501146), si riscontra che è stata fornita una relazione che riporta una sintetica descrizione della visiera, i rischi da cui la stessa è destinata a proteggere, n.2 foto che permettono di identificare il DPI e ricondurlo ai risultati dei test report allegati e delle informazioni sul suo corretto uso, durata, pulizia e conservazione, nonché sintetiche istruzioni d'uso.

Tale documentazione compensa adeguatamente le carenze precedentemente rilevate ai fini della validazione del dispositivo proposto. Si specifica che il prodotto non protegge da goccioline.

Pertanto si esprime parere tecnico positivo, con la limitazione d'uso sopra indicata.

DICHIARA

Per quanto indicato in premessa, la rispondenza alle norme vigenti del seguente dispositivo/dei seguenti dispositivi di protezione individuale presentato/i:

Modello: HT-2020038888 (VISIERA); Fabbricante: Shenzhen Hoteam Art & Crafts Co., Ltd.

La presente dichiarazione è valida dalla data del presente provvedimento fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

Per il mantenimento della validità della presente dichiarazione nel suddetto periodo è essenziale che le caratteristiche tecniche del dispositivo/dei dispositivi di protezione individuale restino immutate e che il prodotto/i prodotti non venga/no modificato/i.

Restano impregiudicate le conseguenze di natura amministrativa, penale e civile nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti sulla base delle quali è resa la presente dichiarazione.

dott. Edoardo Gambacciani

Roma, data di protocollazione

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IN ALLEGATO NOTA INTEGRATIVA