

MANUALE DI ISTRUZIONI

1. PANORAMICA PRODOTTO

1. Display LCD
2. Pulsante di accensione
3. Sensore rilevamento alcolemico
4. Scomparto batteria


Installazione delle batterie: (NON INCLUSE)

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del dispositivo.

Inserire due batterie "AAA" rispettando la polarità indicata.

Richiudere il coperchio del vano batterie.

Quando sullo schermo appare un avviso di batteria scarica, sostituire la batteria.

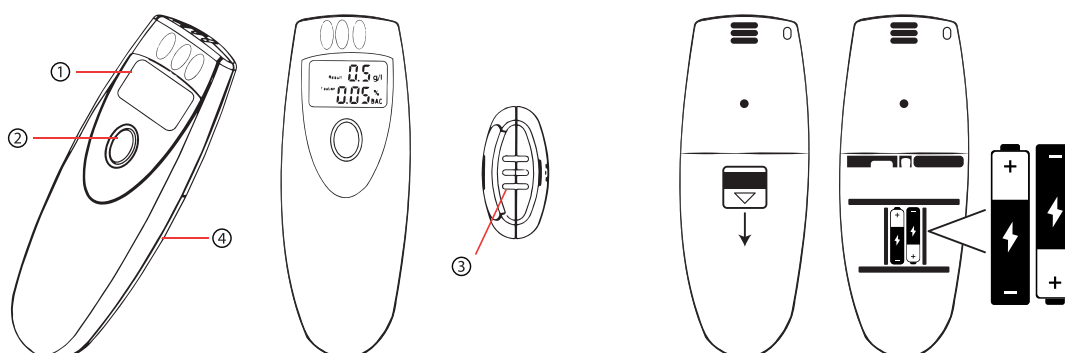


2. COME UTILIZZARE L'ETILOMETRO:

Riscaldamento:

Premendo il tasto di accensione una volta l'etilometro si accenderà emettendo un suono acustico. Sul display apparirà il simbolo di riscaldamento e inizierà il conto alla rovescia da 10 a 0. Questo indica che il dispositivo è in modalità di riscaldamento.

Nota: Se il primo riscaldamento non avviene correttamente, l'etilometro si resetterà automaticamente e ripeterà il riscaldamento. Pulire il dispositivo accuratamente prima dell'uso o se non è stato utilizzato per un lungo periodo. Per un riscaldamento efficace, si consiglia di premere più volte il pulsante di accensione.

Svolgimento test: Se il riscaldamento verrà effettuato correttamente il dispositivo emetterà un suono acustico e sullo schermo LCD comparirà la scritta "BLOW" ed inizierà un conto alla rovescia da 10 a 0.

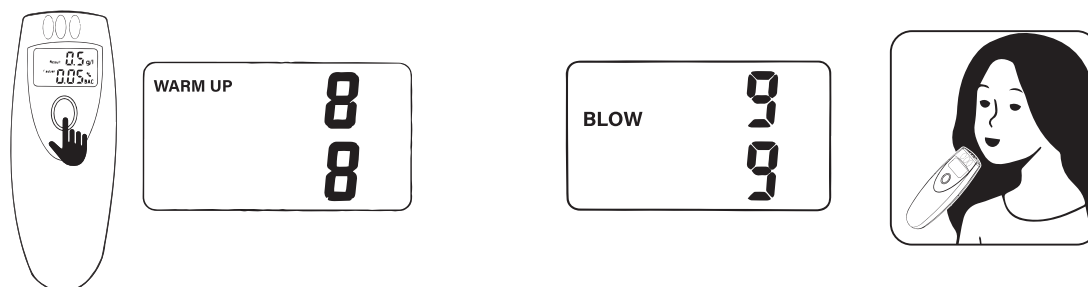

Soffiare nel sensore per 3-5 secondi e successivamente il risultato apparirà sullo schermo.


Se la concentrazione di alcol risulta da 0,02% BAC (o 0,2 g/l) a 0,05% BAC (o 0,5 g/l) comparirà la scritta "CAUTION".

Se la concentrazione di alcol sarà uguale o superiore a 0,05% BAC (o 0,5 g/l) comparirà la scritta "DANGER" seguita da un avviso sonoro.

Nota:

Per ottenere un risultato più accurato, si consiglia di ripetere l'operazione 2-3 volte.

Nota: Intervallo: 0,00%-0,19% BAC (0,0-1,9 g/l).

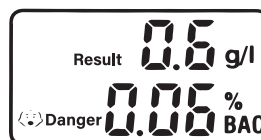

Spegnimento automatico:

Dopo 10 secondi di visualizzazione del risultato, sullo schermo apparirà la scritta "OFF" ed il dispositivo si spegnerà. Se il riscaldamento non avviene correttamente, il dispositivo si spegne automaticamente. Se dopo il riscaldamento non si utilizza il dispositivo, sullo schermo apparirà il risultato 0 e dopo 10 secondi il dispositivo si spegnerà.

3. Attenzione

1. Attendere almeno 20 minuti dopo l'assunzione di bevande alcoliche prima di provare il tester.
2. Per un risultato accurato, non ripetere il test prima che siano trascorsi 3 minuti.
3. Non utilizzare prodotti chimici per pulire il tester.
4. Non utilizzare sostanze aggressive in prossimità del tester, come vernice, insetticidi o alcol.
5. Tenere il dispositivo lontano da ambienti chiusi con aria contaminata.

IMPORTANTE:

NON usare alcun dispositivo come strumento per guidare in stato di ebbrezza

Distribuito da: T-Tex Srl - Via Boggia, 9 - 28013 Gattico-Veruno (NO)
0331.946107 - assistenza@ttex.it



MADE IN PRC - LOT 001A

