

*Arya*<sup>HC</sup>  
Health Care



## EMERGENZA COVID-19

*Abbiamo impiegato le Nostre risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi per gestire l'emergenza COVID-19 che ci ha colpiti.*

*Scopri tutta la collezione di prodotti disponibili.*

**Diffidate da Dispositivi  
Medici NON CERTIFICATI**

CE 0197

DM CLASSE II Certificato

Numero progressivo di registrazione  
Banca Dati Ministero della Salute: 1676967



Il termometro a distanza permette di misurare la temperatura in  
maniera **facile e veloce**, senza contatto con la pelle.



YI-400



FACILE DA  
UTILIZZARE



MISURA A DISTANZA  
SENZA CONTATTO



FUNZIONA CON  
2 PILE AAA  
(NON INCLUDE)



ADATTO A PERSONE  
DI TUTTE LE ETÀ



MISURA ANCHE  
TEMPERATURA  
OGGETTI



PULSOXIMETRO DIGITALE MODELLO CMS50D



- M Misurazione SpO<sub>2</sub>
- ♥ Misurazione Battito Cardiaco
- PI Indice di Perfusione
- ⏻ Spegnimento Automatico
- 🔋 Indicatore Batteria

Il **Pulsoximetro Digitale** è un dispositivo fondamentale per controllare la **saturazione di ossigeno (SpO<sub>2</sub>)** e la **frequenza cardiaca**. È un dispositivo di monitoraggio compatto, semplice da utilizzare ed affidabile.

Lo strumento richiede semplicemente l'inserimento del dito all'interno del sensore fotoelettrico per la diagnosi e il display mostrerà direttamente il valore di saturazione di ossigeno nel sangue.

Perfetto da utilizzare anche in ambito domestico.

Ideale da portare con sé all'interno del proprio kit di pronto soccorso.



DIMENSIONE CONFEZIONE  
L 78 x P 52 x A 40 mm

CMS50D



8 032539 567121

# MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TYPE II - COLORATE

Mascherina Chirurgica, leggera e comoda, Monouso.

Dispositivo Medico Classe I conforme alla Norma EN 14683 - Tipo II

Dall'analisi di laboratorio le Nostre mascherine sono state testate con una filtrazione batterica (BFE) del **99,9%!**



DISPOSITIVO MEDICO



DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

AZZURRO

ROSA

VIOLA

NERO



CF10PZ-LBLU

CF10PZ-PIN

CF10PZ-PUR

CF10PZ-BLA



DISPONIBILI ANCHE MASCHERINE DA BAMBINO

CF10PZBAM-LBLU

CF10PZBAM-PIN

CF10PZBAM-PUR

CF10PZBAM-BLA



14,5 x 9,3 cm

CONFEZIONATE IN BUSTE DA 10 PZ.

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 2008604

- ALTA CAPACITÀ FILTRANTE
- 3 STRATI TNT CERTIFICATO (2 IN POLIPROPILENE SPUNBUNDED E 1 IN FIBRE DI POLIPROPILENE MELT BLOWN)
- 100% POLIPROPILENE

- ELASTICI AURICOLARI
- SAGOMABILE SUL NASO
- TESSUTO ANTI-IRRITAZIONE E BIOCAMPATIBILE

## MASCHERINA CHIRURGICA - LUXURY

CONFEZIONATA IN BUSTE DA 3 PZ.

CARATTERISTICHE:

- ALTA CAPACITÀ FILTRANTE
- 3 STRATI TNT CERTIFICATO (2 IN POLIPROPILENE SPUNBUNDED E 1 IN FIBRE DI POLIPROPILENE MELT BLOWN)
- 100% POLIPROPILENE
- ELASTICI AURICOLARI
- SAGOMABILE SUL NASO
- TESSUTO ANTI-IRRITAZIONE E BIOCAMPATIBILE



SCANSIONA PER LA SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

CF3PZ-LUX



NOVITÀ 2021

# KIDS

DA 6 A 12 ANNI

Le mascherine FFP2 KIDS sono appositamente studiate per adattarsi perfettamente alla fisionomia del viso del bambino.

MASCHERINA DA BAMBINO FILTRANTE FFP2 NR

PRODOTTO CERTIFICATO

Norma UNI EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR



**BIANCO**

FFP2 KIDS - BIANCA  
FFP2KIDS-WHI



8 032539 567909

FFP2 KIDS 15PZ - BIANCA  
FFP2KIDS15-WHI



8 032539 567947

**FANTASY**

FFP2 KIDS - FANTASY  
FFP2KIDS-FAN



8 032539 567916

FFP2 KIDS 15PZ - FANTASY  
FFP2KIDS15-FAN



8 032539 567954

**BLU**

FFP2 KIDS - BLU  
FFP2KIDS-BLU



8 032539 567930


FFP2 KIDS 15PZ - BLU  
FFP2KIDS15-BLU



8 032539 567978

**ROSA**

FFP2 KIDS - ROSA  
FFP2KIDS-PIN

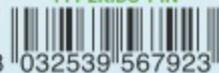

8 032539 567923

FFP2 KIDS 15PZ - ROSA  
FFP2KIDS15-PIN



8 032539 567961



Scansiona  
il QR Code

Le mascherine FFP2 KIDS sono realizzate con materiali anallergici, senza lattice e sono sagomate per rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto del bambino.

Trattandosi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di tipologia filtrante, sono in grado di bloccare le particelle solide e i droplets (micro goccioline respiratorie) che possono trasportare virus e batteri, proteggendo le vie respiratorie.

Le mascherine FFP2 KIDS sono composte da diversi strati di materiale isolante e filtrante, che fungono da barriera per le particelle di diverse dimensioni, dalle più grandi alle più fini, arrivando ad una capacità di filtraggio  $\geq 95\%$ .



SCATOLA  
DA 15 UNITÀ

CONFEZIONATE  
SINGOLARMENTE



# PROTEGGITI CON STILE! MASCHERINE FFP2 COLORATE

NOVITÀ

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE

Le mascherine FFP2 sono realizzate con materiali anallergici, senza lattice e sono sagomate per rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto.

DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:

BIANCO

ROSA

BLU

GRIGIO

NERO



MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-WHI

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-PIN

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-BLU

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-GRE

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-BLA



8 032539 566834

8 032539 566841

8 032539 566858

8 032539 566865

8 032539 566872

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-WHI-CONF.25PZ

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-PIN-CONF.25PZ

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-BLU-CONF.25PZ

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-GRE-CONF.25PZ

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-BLA-CONF.25PZ



8 032539 566889

8 032539 566896

8 032539 566902

8 032539 566919

8 032539 566926

Le mascherine FFP2 sono dispositivi di protezione individuale (DPI) di tipologia filtrante capaci di bloccare le particelle solide e i droplets (micro goccioline respiratorie) che possono trasportare virus e batteri, proteggendo le vie respiratorie.

Le mascherine filtranti FFP2 sono composte da più strati di materiale isolante e filtrante, in grado di bloccare le particelle di diverse dimensioni, dalle più grandi a quelle più fini arrivando ad una capacità di filtraggio  $\geq 95\%$ , bloccando sia le particelle solide sia i droplets liquidi.



SCANSIONA  
IL QR CODE

PRODOTTO CERTIFICATO  
EN 149:2001 + A1:2009



ABBINA LA MASCHERINA  
AL TUO OUTFIT!



SCATOLA DA  
25 MASCHERINE

SCATOLA 25 MASCHERINE  
L 12,5 x P 12,5 x A 10 cm

MASTER COMPOSTO DA 54 SCATOLE  
TOTALE 1.350 MASCHERINE  
L 39 x P 39 x A 63 cm - 11,50 Kg

BANCALE COMPOSTO DA 18 MASTER  
TOTALE 24.300 MASCHERINE  
L 120 x P 80 x A 205 cm - 230 Kg



# Arya<sup>HC</sup>

## Health Care

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE



SCATOLA CON  
DOPPIO CODICE EAN:

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-WHI

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-WHI-CONF.25PZ



### BUSTINA SINGOLA STAMPATA CON CODICE EAN

Arya<sup>HC</sup>  
Health Care  
**MASCHERINA  
FILTRANTE FFP2 NR**

#### ISTRUZIONI PER L'USO



1  
Posizionare la mascherina sul volto in modo da ricoprire completamente il naso, la bocca ed il mento.



2  
Allineare la mascherina in modo da aderire al dorso del naso. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie.



3  
Controllare che la mascherina sia perfettamente aderente al volto.

**PRECAUZIONI:** 1. Ispezionare la mascherina prima dell'uso: non utilizzarla se risulta danneggiata o sporca. 2. Non lavare, scaldare o disinfettare la mascherina. 3. Nel togliere la mascherina, non toccare lo strato interno per evitare contaminazioni. 4. Non utilizzare in ambienti con scarso ossigeno o con gas tossici. 5. Sostituire la mascherina se è rovinata o presenta un odore sgradevole. 6. Non adatta a individui con sistema respiratorio compromesso (per esempio con asma o enfisema), anziani o pazienti non in grado di segnalare le proprie condizioni fisiche o muovere liberamente le mani. 7. La durata di utilizzo consigliata per ciascuna mascherina è di 8 ore. **AVVERTENZE:** 1. Se la mascherina è indossata scorrettamente, il suo effetto protettivo è compromesso. 2. Togliere la mascherina in caso di malessere o di forte odore irritante. **MATERIALE:** TNT, cotone ad aria calda, tessuto soffiato a fusione.

**CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE:** conservare in luogo pulito e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole e dai gas corrosivi, umidità ≤80%.

**FABBRICANTE:**  
Shenzhen Hezheng Industrial Development Co. Ltd.  
601 Zhaoye Workshop, No. 172, Huanguanzhong Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

**DATA DI FABBRICAZIONE:** 25/10/2020  
**DATA DI SCADENZA:** 30/09/2022



MODELLO: HZ96  
CATEGORIA DPI: III  
LOT: 20201025



Per la Dichiarazione di Conformità visitare il sito  
[www.t-tex.it/ffp2](http://www.t-tex.it/ffp2)  
oppure scansionare il QR code

MADE IN CHINA

# Arya<sup>HC</sup>

## Health Care

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE



SCATOLA CON  
DOPPIO CODICE EAN:

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-PIN

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-PIN-CONF.25PZ



### BUSTINA SINGOLA STAMPATA CON CODICE EAN

Arya<sup>HC</sup>  
Health Care

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 NR

#### ISTRUZIONI PER L'USO



1  
Posizionare la mascherina sul volto in modo da ricoprire completamente il naso, la bocca ed il mento.



2  
Allineare la mascherina in modo da aderire al dorso del naso. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie.



3  
Controllare che la mascherina sia perfettamente aderente al volto.

**PRECAUZIONI:** 1. Ispezionare la mascherina prima dell'uso: non utilizzarla se risulta danneggiata o sporca. 2. Non lavare, scaldare o disinfettare la mascherina. 3. Nel togliere la mascherina, non toccare lo strato interno per evitare contaminazioni. 4. Non utilizzare in ambienti con scarso ossigeno o con gas tossici. 5. Sostituire la mascherina se è rovinata o presenta un odore sgradevole. 6. Non adatta a individui con sistema respiratorio compromesso (per esempio con asma o enfisema), anziani o pazienti non in grado di segnalare le proprie condizioni fisiche o muovere liberamente le mani. 7. La durata di utilizzo consigliata per ciascuna mascherina è di 8 ore. **AVVERTENZE:** 1. Se la mascherina è indossata scorrettamente, il suo effetto protettivo è compromesso. 2. Togliere la mascherina in caso di malessere o di forte odore irritante. **MATERIALE:** TNT, cotone ad aria calda, tessuto soffiato a fusione.

**CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE:** conservare in luogo pulito e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole e dai gas corrosivi, umidità ≤80%.

**FABBRICANTE:**  
Shenzhen Hezheng Industrial Development Co. Ltd.  
601 Zhaoye Workshop, No. 172, Huanguanzhong Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

**DATA DI FABBRICAZIONE:** 25/10/2020  
**DATA DI SCADENZA:** 30/09/2022



MADE IN CHINA



MODELLO: HZ96  
CATEGORIA DPI: III  
LOT: 20201025



Per la Dichiarazione di Conformità visitare il sito  
[www.t-tex.it/ffp2](http://www.t-tex.it/ffp2)  
oppure scansionare il QR code

# Arya<sup>HC</sup>

## Health Care

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE



SCATOLA CON  
DOPPIO CODICE EAN:

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-BLU



SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-BLU-CONF.25PZ



### BUSTINA SINGOLA STAMPATA CON CODICE EAN

Arya<sup>HC</sup>  
Health Care

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 NR

#### ISTRUZIONI PER L'USO



1  
Posizionare la mascherina sul volto in modo da ricoprire completamente il naso, la bocca ed il mento.



2  
Allineare la mascherina in modo da aderire al dorso del naso. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie.



3  
Controllare che la mascherina sia perfettamente aderente al volto.

**PRECAUZIONI:** 1. Ispezionare la mascherina prima dell'uso: non utilizzarla se risulta danneggiata o sporca. 2. Non lavare, scaldare o disinfettare la mascherina. 3. Nel togliere la mascherina, non toccare lo strato interno per evitare contaminazioni. 4. Non utilizzare in ambienti con scarso ossigeno o con gas tossici. 5. Sostituire la mascherina se è rovinata o presenta un odore sgradevole. 6. Non adatta a individui con sistema respiratorio compromesso (per esempio con asma o enfisema), anziani o pazienti non in grado di segnalare le proprie condizioni fisiche o muovere liberamente le mani. 7. La durata di utilizzo consigliata per ciascuna mascherina è di 8 ore. **AVVERTENZE:** 1. Se la mascherina è indossata scorrettamente, il suo effetto protettivo è compromesso. 2. Togliere la mascherina in caso di malessere o di forte odore irritante. **MATERIALE:** TNT, cotone ad aria calda, tessuto soffiato a fusione.

**CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE:** conservare in luogo pulito e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole e dai gas corrosivi, umidità ≤80%.

**FABBRICANTE:**  
Shenzhen Hezheng Industrial Development Co. Ltd.  
601 Zhaoye Workshop, No. 172, Huanguanzhong Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

**DATA DI FABBRICAZIONE:** 25/10/2020  
**DATA DI SCADENZA:** 30/09/2022



**IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:**  
T-Tex Srl - Via Boggia 9  
28013 - Gattico (NO)  
P.I. 02450600123

MADE IN CHINA

MODELLO: HZ96  
CATEGORIA DPI: III  
LOT: 20201025



Per la Dichiarazione di Conformità visitare il sito  
[www.t-tex.it/ffp2](http://www.t-tex.it/ffp2)  
oppure scansionare il QR code



# Arya<sup>HC</sup>

## Health Care

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE



SCATOLA CON  
DOPPIO CODICE EAN:

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-GRE



SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-GRE-CONF.25PZ



### BUSTINA SINGOLA STAMPATA CON CODICE EAN

Arya<sup>HC</sup>  
Health Care

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 NR

#### ISTRUZIONI PER L'USO



1  
Posizionare la mascherina sul volto in modo da ricoprire completamente il naso, la bocca ed il mento.



2  
Allineare la mascherina in modo da aderire al dorso del naso. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie.



3  
Controllare che la mascherina sia perfettamente aderente al volto.

**PRECAUZIONI:** 1. Ispezionare la mascherina prima dell'uso: non utilizzarla se risulta danneggiata o sporca. 2. Non lavare, scaldare o disinfettare la mascherina. 3. Nel togliere la mascherina, non toccare lo strato interno per evitare contaminazioni. 4. Non utilizzare in ambienti con scarso ossigeno o con gas tossici. 5. Sostituire la mascherina se è rovinata o presenta un odore sgradevole. 6. Non adatta a individui con sistema respiratorio compromesso (per esempio con asma o enfisema), anziani o pazienti non in grado di segnalare le proprie condizioni fisiche o muovere liberamente le mani. 7. La durata di utilizzo consigliata per ciascuna mascherina è di 8 ore. **AVVERTENZE:** 1. Se la mascherina è indossata scorrettamente, il suo effetto protettivo è compromesso. 2. Togliere la mascherina in caso di malessere o di forte odore irritante. **MATERIALE:** TNT, cotone ad aria calda, tessuto soffiato a fusione.

**CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE:** conservare in luogo pulito e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole e dai gas corrosivi, umidità  $\leq 80\%$ .

**FABBRICANTE:**  
Shenzhen Hezheng Industrial Development Co. Ltd.  
601 Zhaoye Workshop, No. 172, Huanguanzhong Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

**DATA DI FABBRICAZIONE:** 25/10/2020  
**DATA DI SCADENZA:** 30/09/2022



MADE IN CHINA

GREY - FFP2HZ96-GRE



MODELLO: HZ96  
CATEGORIA DPI: III  
LOT: 20201025



Per la Dichiarazione di Conformità visitare il sito [www.t-tex.it/ffp2](http://www.t-tex.it/ffp2)

oppure scansionare il QR code

# Arya<sup>HC</sup>

## Health Care

SCATOLA  
DA 25 MASCHERINE  
CONFEZIONATE  
PER ESSERE  
VENDUTE  
SINGOLARMENTE  
A NORMA DI LEGGE



SCATOLA CON  
DOPPIO CODICE EAN:

MASCHERINA SINGOLA:  
FFP2HZ96-BLA

SCATOLA DA 25 PZ.:  
FFP2HZ96-BLA-CONF.25PZ



### BUSTINA SINGOLA STAMPATA CON CODICE EAN

Arya<sup>HC</sup>  
Health Care  
**MASCHERINA  
FILTRANTE FFP2 NR**

#### ISTRUZIONI PER L'USO



1  
Posizionare la mascherina sul volto in modo da ricoprire completamente il naso, la bocca ed il mento.



2  
Allineare la mascherina in modo da aderire al dorso del naso. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie.



3  
Controllare che la mascherina sia perfettamente aderente al volto.

**PRECAUZIONI:** 1. Ispezionare la mascherina prima dell'uso: non utilizzarla se risulta danneggiata o sporca. 2. Non lavare, scaldare o disinfettare la mascherina. 3. Nel togliere la mascherina, non toccare lo strato interno per evitare contaminazioni. 4. Non utilizzare in ambienti con scarso ossigeno o con gas tossici. 5. Sostituire la mascherina se è rovinata o presenta un odore sgradevole. 6. Non adatta a individui con sistema respiratorio compromesso (per esempio con asma o enfisema), anziani o pazienti non in grado di segnalare le proprie condizioni fisiche o muovere liberamente le mani. 7. La durata di utilizzo consigliata per ciascuna mascherina è di 8 ore. **AVVERTENZE:** 1. Se la mascherina è indossata scorrettamente, il suo effetto protettivo è compromesso. 2. Togliere la mascherina in caso di malessere o di forte odore irritante. **MATERIALE:** TNT, cotone ad aria calda, tessuto soffiato a fusione.

**CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE:** conservare in luogo pulito e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole e dai gas corrosivi, umidità  $\leq 80\%$ .

**FABBRICANTE:**  
Shenzhen Hezheng Industrial Development Co. Ltd.  
601 Zhaoye Workshop, No. 172, Huanguanzhong Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

**DATA DI FABBRICAZIONE:**  
25/10/2020

**DATA DI SCADENZA:**  
30/09/2022



MADE IN CHINA

MODELLO: HZ96  
CATEGORIA DPI: III  
LOT: 20201025



Per la Dichiarazione di Conformità visitare il sito [www.t-tex.it/ffp2](http://www.t-tex.it/ffp2) oppure scansionare il QR code



*Arya*<sup>HC</sup>  
Health Care



**T-TEX srl** 

Via Boggia, 9 - 28013 Gattico (Fraz. Maggiate Superiore) (NO) - ITALY  
Tel.: +39 0331.946107 - Fax: +39 0331.942514  
Email: [info@ttex.it](mailto:info@ttex.it) - Web: [www.t-tex.it](http://www.t-tex.it)